



# SCHNARCHEN SIE NOCH?



SISSEL®  
**SILENCIUM®**

Die sanfte interaktive  
Anti-Schnarch-Lösung



Der effektive, nicht-invasive Weg zur Schnarchreduktion.

[WWW.SISSELSILENCIUM.COM](http://WWW.SISSELSILENCIUM.COM)

## SISSEL® SILENCIUM® – DIE SANFTE INTERAKTIVE ANTI-SCHNARCH-LÖSUNG

### **Ruhiger und erholsamer Schlaf in einer neuen Dimension**

Schlafen ist gesund und lebenswichtig, vor allem auch für unser psychisches Gleichgewicht. Im Schlaf werden die Ereignisse des Tages verarbeitet, das Zellwachstum angeregt, die Erholung und Regeneration des Gewebes gefördert und das Immunsystem gestärkt. Doch tiefer und erholsamer Schlaf hat einen natürlichen „Feind“: das Schnarchen.

**Schnarchen ist ein oft verkanntes Problem, dessen Folgen auf lange Sicht physisch wie psychisch zu spüren sind. Eine permanent gestörte Nachtruhe kann u.a. zu Tagesmüdigkeit, Gereiztheit, Konzentrationsproblemen und einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit führen. Insbesondere bei schwerem Schnarchen gehen damit vielfach auch ernsthafte Gesundheitsprobleme einher.**

Der Schnarchende belastet jedoch nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Partner, der nach einer durch permanentes Schnarchen gestörten Nachtruhe häufig genauso müde ist wie der Direkt-Betroffene.

### **DIE VORTEILE**

- **signifikante Schnarch-Reduktion – auch nach subjektivem Empfinden seitens der Bettpartner\***
- **Erhalt des Tiefschlafs, keine vermehrten Weckreaktionen\***
- **Verbesserung der Lebensqualität – von Betroffenen wie Partnern**
- **Steigerung von Vitalität und Konzentration, Erhöhung der Stresstoleranz**
- **einfache Nutzung – ein Handgriff genügt**
- **klinisch getestet, u.a. Universitäts-HNO-Klinik Mannheim**




\* Ergebnis einer klinischen Studie an der Universitäts-HNO-Klinik Mannheim sowie eines internationalen Feldtests in häuslicher Umgebung.



Einfache Nutzung –  
ein Handgriff genügt

12 Luftkammern bewegen den Kopf sanft und ohne  
den Tiefschlaf zu stören in eine andere Position.

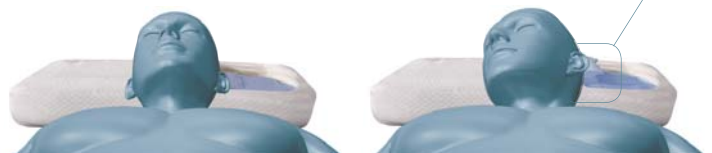



## DIE FUNKTIONSWEISE

### **Verbesserte Nachtruhe – OHNE Medikamente, invasive Methoden oder lästige Anti-Schnarch-Apparaturen**

Mit der interaktiven Anti-Schnarch-Lösung „SISSEL® SILENCIUM®“ präsentiert sich eine weltweit einzigartige Innovation, die Schnarchenden und deren lärmgeplagten Partnern die Nachtruhe – und damit das Leben – angenehmer macht.

Das SISSEL® SILENCIUM® registriert kontinuierlich die Schlafgeräusche sowie die Position des Kopfes. Sobald über die integrierten Mikrofone ein Schnarchen festgestellt wird, werden – je nach Kopflage – entsprechende Luftkammern aufgepumpt und der Kopf so selbständig, sanft und unmerklich in eine andere Position bewegt. Der Lagewechsel des Kopfes vergrößert den Abstand zwischen Zunge und Rachen, erweitert somit die Atemwege und reduziert deutlich das Schnarchen. Falls bei der ersten Bewegung noch kein positiver Effekt erzielt wird, führt das SISSEL® SILENCIUM® den Kopf sanft und ohne den Tiefschlaf zu stören Stück für Stück weiter: nach links bzw. rechts, auf und ab, bis das Schnarchen gestoppt bzw. die Position gefunden ist, in der das Schnarchen am stärksten reduziert ist.

Schnarch-Reduktion mit System: Mit Hilfe des SISSEL® SILENCIUM® wird das Schnarchen signifikant verringert\*. Es bietet daher eine einfache und effektive Lösung für einen tiefen, erholsamen Schlaf – ohne vermehrte Weckreaktionen auszulösen\*. Mit diversen kostenlosen Apps für Smartphone oder Tablet (z.B. Sleep Talk Recorder, SnoreControl oder Quit Snoring – siehe App-Store) können Benutzer auf Wunsch ihr Schnarchverhalten aufzeichnen und so die Effektivität des SISSEL® SILENCIUM® überprüfen.

**SISSEL® SILENCIUM® – die effektive,  
nicht-invasive und klinisch getestete  
Anti-Schnarch-Lösung!**

\* Ergebnis einer klinischen Studie an der Universitäts-HNO-Klinik Mannheim sowie eines internationalen Feldtests in häuslicher Umgebung.

## SCHNARCHEN UND DIE FOLGEN

Obwohl es in Europa schätzungsweise über 100 Millionen Schnarcher gibt, werden die gesundheitlichen und sozialen Folgen oft unzureichend beachtet. Denn permanentes Schnarchen kann auf lange Sicht das physische wie psychische Wohlbefinden spürbar beeinträchtigen, z.B. in Form von...



- Tagesmüdigkeit
- Konzentrationsmangel
- eingeschränkter Leistungsfähigkeit
- verminderter Stress-Resistenz
- Reizbarkeit

Zudem kann schweres Schnarchen laut aktuellen Studien das Herz und die Halsschlagadern schädigen und somit das Risiko, eine Herzerkrankung oder einen Schlaganfall zu erleiden, erhöhen. Hier gilt es, mit geeigneten Massnahmen frühzeitig entgegenzuwirken und gegebenenfalls einen Facharzt zu konsultieren.

## HIGHTECH FÜR EIN PLUS AN LEBENSQUALITÄT

### SISSEL® SILENCIUM® – die Produkt-Merkmale:

- neue, innovative Multi-Layer-Konstruktion
- intelligente, leise Technik für nahezu lautlosen Betrieb
- abnehmbarer, waschbarer Aussenbezug für einfache Pflege
- atmungsaktiver, wasserundurchlässiger Innenbezug (abwischbar)
- Masse: ca. 60 x 40 x 7/9 cm
- Betrieb mit 6 V – getestet auf EMV (= elektromagnetische Verträglichkeit)
- erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte


## Die Eingewöhnung

Das SISSEL® SILENCIUM® ist ein Medizinprodukt und bedarf einer üblichen Eingewöhnungsphase. Die vollständige Umgewöhnung an den veränderten Liegekomfort und die Funktion des Anti-Schnarch-Systems kann von wenigen Tagen bis zu 4 Wochen dauern. Sie schlafen in dieser Zeit von Nacht zu Nacht tiefer und ruhiger.



## DER AUFBAU

- 1 Mikrofone zur Registrierung der Schnarch-Geräusche
- 2 viskoelastische Auflage für erhöhten Komfort
- 3 Sensormatte zur Registrierung der Kopfposition
- 4 6 x 2 Luftkammern zur Kopfumlagerung
- 5 flexible Vario-Einlage zur Höhenanpassung

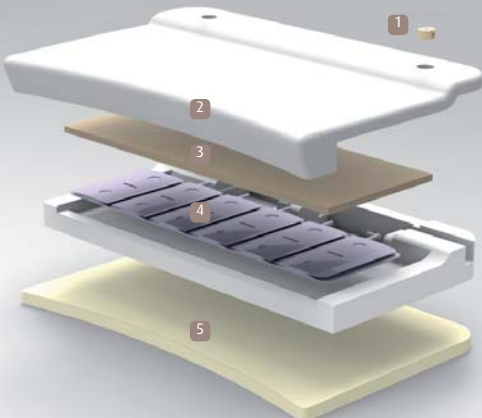



**SISSEL® SILENCIUM®**  
Erleben Sie ruhigen,  
erholsamen Schlaf so,  
wie er sein sollte!

Lassen Sie sich beraten von:

**MEHR  
INFOS  
HIER!**

[WWW.SISSELSILENCIUM.COM](http://WWW.SISSELSILENCIUM.COM)



**Vertrieb (D/AT):**

novacare® gmbh · Bruchstrasse 48  
D-67098 Bad Dürkheim · [www.sissel.de](http://www.sissel.de)



**Hersteller:**

**SISSEL® GmbH** · Bruchstrasse 48 · D-67098 Bad Dürkheim · Germany

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Garantiebedingungen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Farb-, Material- und Konstruktionsänderungen möglich. Designed by nitetronic

AE 10 V4



4 250479 614864