

SISSEL®

SILENCIUM

INTERAKTIVES 3D-ANTI-SCHNARCH-KISSEN



KURZANLEITUNG

INBETRIEBNAHME VON ANALYSE-SOFTWARE UND ANTI-SCHNARCH-KISSEN

1. Laptop mit Netzkabel an das Stromnetz anschließen.
2. SISSEL® SILENCIUM Kissen auspacken und mit weißem Netzkabel an das Stromnetz anschließen.
3. Laptop mit dem USB-Kabel (nur im Lieferumfang des Testkissens vorhanden) mit dem SISSEL® SILENCIUM Kissen verbinden - SISSEL® SILENCIUM Kissen einschalten (POWER).
4. Laptop einschalten – auf Symbol in Mitte des Bildschirms klicken und es erscheint das Desktop mit dem Button „SILENCIUM“.
5. Mit Klick auf den Button „SILENCIUM“ die Software starten, es erscheint das Datenblatt.
6. Dateinamen ändern in der Dateileiste (z.B.: c:\userdata\namedatum.gnf)
7. Eventuell Uhrzeit ab Datenstart eingeben oder beim zu Bett gehen auf **START** drücken.
8. Vier Testnächte:
 1. Nacht ohne Aktivität des Kissens, um das Schnarchverhalten aufzuzeichnen.
 2. Nacht mit Aktivität (Active+POWER schalten)
 3. Nacht ohne Aktivität des Kissens
 4. Nacht mit Aktivität des Kissens.
9. Bitte jeden Tag den Datennamen ändern, sonst werden die Aufzeichnungen vom Vortag überschrieben.
10. Sobald die Aufzeichnung läuft, kann das Laptop zugeklappt werden.

Vertrieb:

novacare 

novacare® gmbh

Bruchstraße 48 · D-67098 Bad Dürkheim · Tel. 06322/9565-0

Fax 06322/9565-65 · info@novacare.de · www.sissel.de